

POBRANIE I TRANSPORT MATERIAŁU

Pobrać krew pełną pacjenta oraz krew kontrolną do próbek z K2-EDTA o pojemności 2,6ml (1 próbka pacjenta + 1 próbka kontroli – krew pobrana od osoby niespokrewnionej, bez podejrzenia choroby metabolicznej). W przypadku dzieci poniżej 2 roku życia pobrać minimum 1ml krwi pełnej do próbki z K2-EDTA.

Próbki z krwią pacjenta oraz kontroli należy pobrać i dostarczyć jednocześnie do laboratorium do godziny 12-tej tego samego dnia w temperaturze pokojowej lub w ciągu maksymalnie 24h od pobrania w temp. 4 - 8 °C.

W przypadku wysłania z terminem dostarczenia na następny dzień próbka powinna być transportowana w temperaturze 4 – 8 °C (np. z użyciem wkładów lodowych). **Próbka nie może ulec zamrożeniu. Przy planowaniu wysyłki proszę wziąć pod uwagę, że materiał na to badanie przyjmujemy w dniach Pn-Pt w godzinach 8.00 – 12.00.**

Uwaga!

Przynajmniej dzień przed pobraniem i wysłaniem próbki pacjenta i kontroli prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (22) 32-77-256.