



**Instytut Matki i Dziecka**  
**Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej**

Ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa; tel.: 22 32 77 256 , fax.: 22 32 77 161

Pobranie i transport materiału na oznaczenie ilościowe  
galaktozy i galaktozo-1-fosforanu

Krew pobrać na bibułę Whatman 903 (jak na przesiew). Do badania można pobrać krew żylną lub włośniczkową. Krew musi być świeżo pobrana w ilości nie mniejszej niż 3 krążki i powinna dobrze przesiąknąć na obie strony bibuły.

Materiał może być suszony w temperaturze pokojowej nie dłużej niż 2 godziny, a następnie schowany do lodówki i tak przechowywany, aż do momentu wysłania.

Bibułę wraz ze skierowaniem należy włożyć do zwykłej papierowej koperty (**nie stosować kopert z folią bąbelkową**). Materiał musi być dostarczony do laboratorium w ciągu maksymalnie 14 dni od momentu pobrania.