

### **POBRANIE I TRANSPORT MATERIAŁU:**

**Osocze** – pobranie krwi na heparynę litową. Materiał wirować 5 minut 3000 RPM. Osocze zebrać, zamrozić i w tej postaci transportować. Min. ilość 0,5 ml osocza.

**Mocz** – próbka moczu zebrana o dowolnej porze w ilości przynajmniej 20 ml. Próbkę zamrozić i w tej formie transportować.

**PMR** – pobranie do czystej probówki lub eppendorfa. Skrwawiony PMR należy odwirować i napisać na skierowaniu o skrwawieniu. Próbkę zamrozić i w tej formie transportować. Min. Ilość 0,3 ml.