



**Instytut Matki i Dziecka**  
**Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej**

Ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa; tel.: 22 32 77 256 , fax.: 22 32 77 161

Pobranie i transport materiału na oznaczenie aktywności enzymu dehydrogenazy  
średnio-łańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCAD) w limfocytach

Pobrać krew pełną pacjenta oraz krew kontrolną do próbek z K2 - EDTA o pojemności 2,6ml (1 próbka pacjenta + 1 próbka kontroli – krew pobrana od osoby niespokrewnionej, bez podejrzenia choroby metabolicznej). W przypadku dzieci poniżej 2 roku życia pobrać minimum 1ml krwi pełnej do próbki z K2 - EDTA.

Probówki z krwią pacjenta oraz kontroli należy pobrać i dostarczyć jednocześnie do laboratorium do godziny 12-tej tego samego dnia w temperaturze pokojowej lub w ciągu maksymalnie 24h od pobrania w temp. 4 - 8 °C.

W przypadku wysłania z terminem dostarczenia na następny dzień próbka powinna być transportowana w temperaturze 4 – 8 °C (np. z użyciem wkładów lodowych). Próbka nie może ulec zamrożeniu.

**Przy planowaniu wysyłki proszę wziąć pod uwagę, że materiał na to badanie przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 11.00.**

**Uwaga! Przynajmniej dzień przed pobraniem i wysłaniem próbki pacjenta i kontroli prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (22) 32 - 77 - 256.**